



Quickstart Guide


Setting up your **Kodak Wi-Fi Distance Camera** with **Prodiigi** software on **Windows** is easy and enables seamless distance viewing and magnification without disrupting your primary Internet connection.

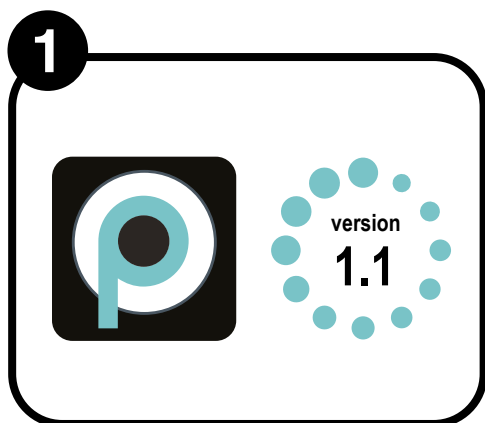


Ensure your Prodiigi software is installed and updated to **version 1.1** or later.

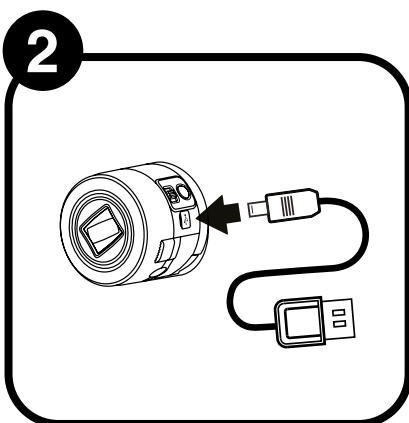


Fully **charge** the Kodak distance camera (SL-10 or SL-25) using the charger.

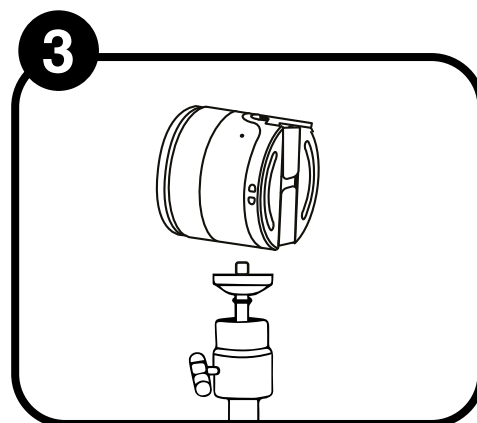


Attach the Kodak camera to the flexible gooseneck.

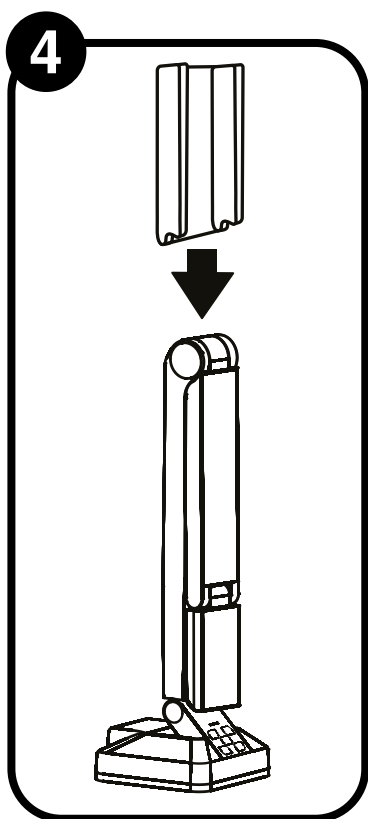


Slide the mounting adapter onto the HoverCam SOLO 8+ vertical arm.

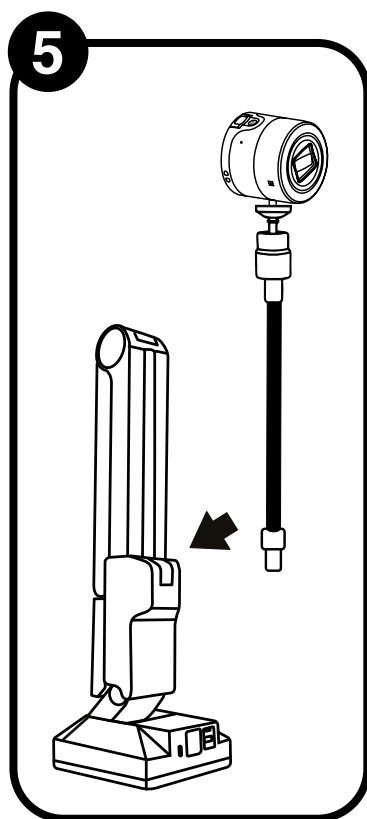

Insert the gooseneck with the camera into the adapter.

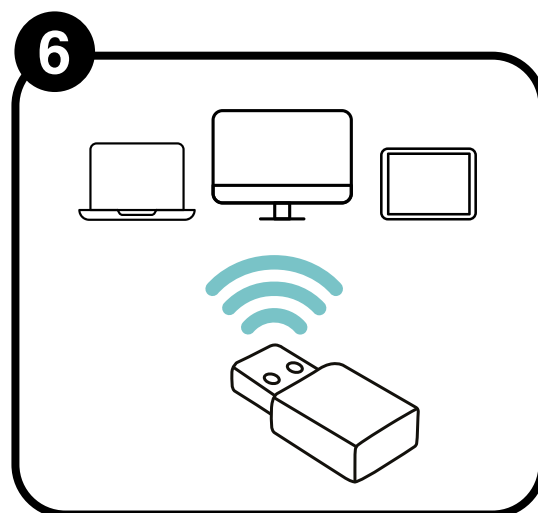


Plug the Wi-Fi Dual Band **USB Adapter** into a USB port on your Windows device and follow the brief setup prompts.

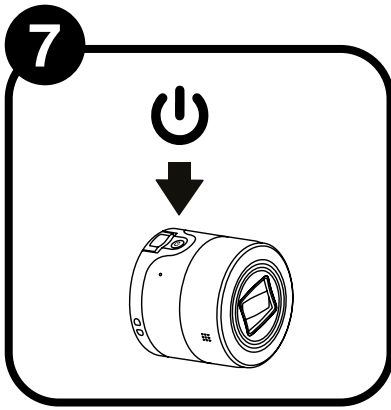


Press the **power** button on the **Kodak camera**.




Launch the Prodigy software and open the **Distance** application.

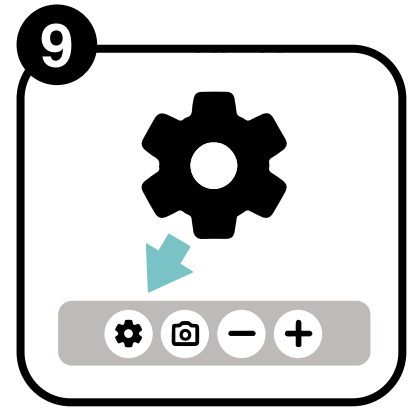


Click the **Settings** (gear) icon.

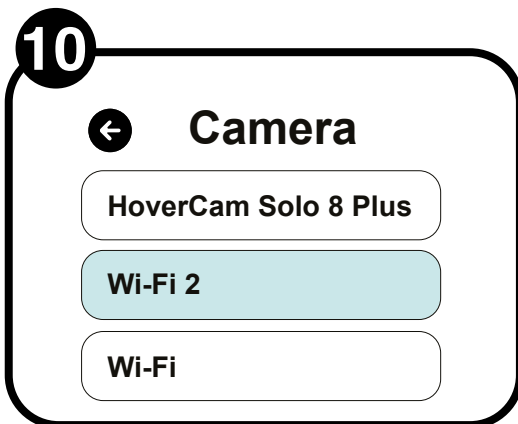


Select "**Camera**," then choose "**Wi-Fi 2**" from the list at the bottom.

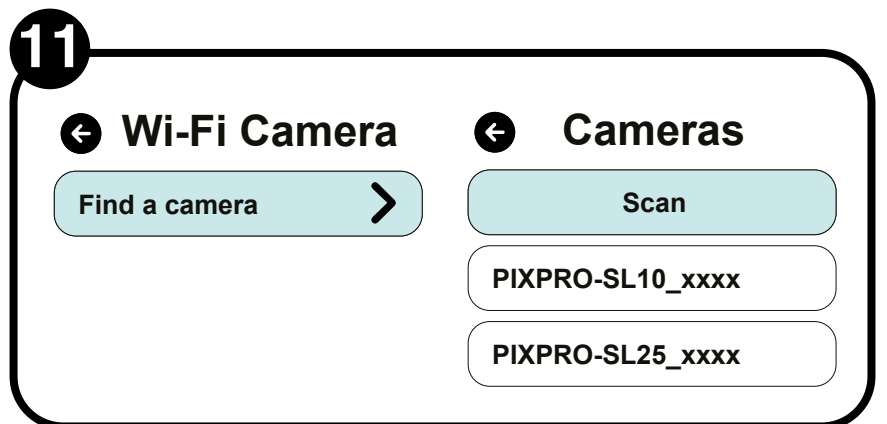

Click "**Find a camera**" and select either PIXPRO-SL10_xxxx or PIXPRO-SL25_xxxx from the options.

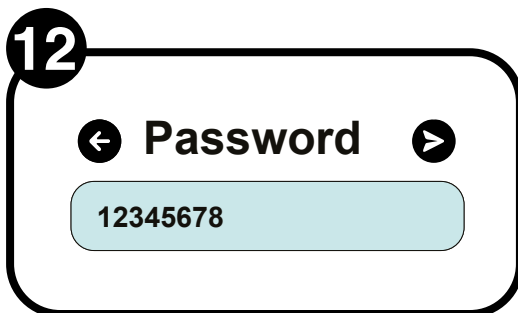


Enter the Kodak camera password: **12345678**.

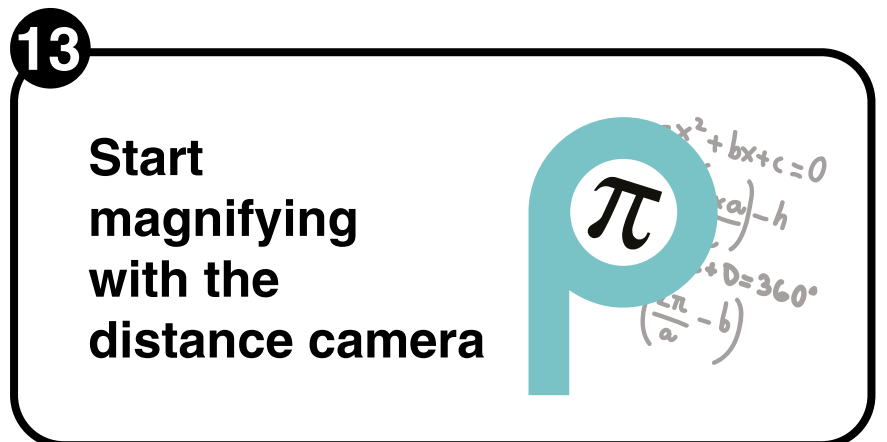


For more information on using Prodigy for Windows or the Kodak distance camera, please refer to the **User Guide**.

Guide de démarrage


Configurer votre **caméra Wi-Fi à distance Kodak** avec le **logiciel Prodigy sur Windows** est simple et permet une visualisation et un agrandissement à distance sans perturber votre connexion Internet.

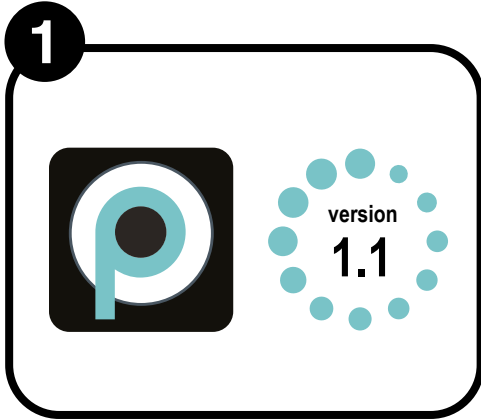


Assurez-vous que votre logiciel Prodigy est installé et mis à jour à la **version 1.1** ou ultérieure.

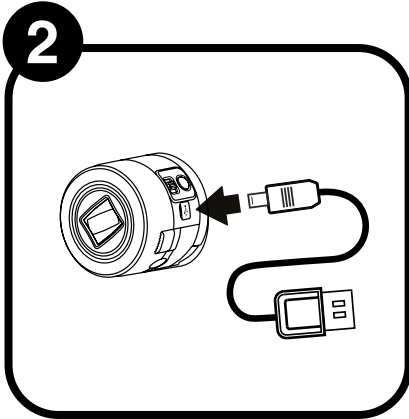


Chargez complètement la caméra à distance Kodak (SL-10 ou SL-25) à l'aide du chargeur.

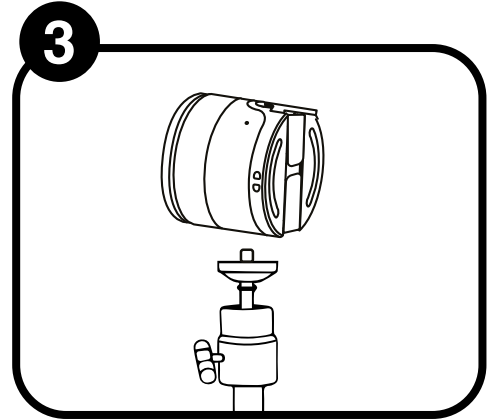


Fixez la caméra Kodak au col de cygne flexible.

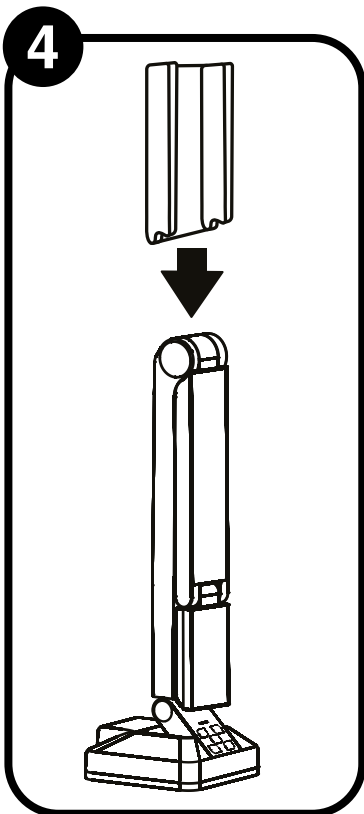


Glissez l'adaptateur de montage sur le bras vertical de la HoverCam SOLO 8+.

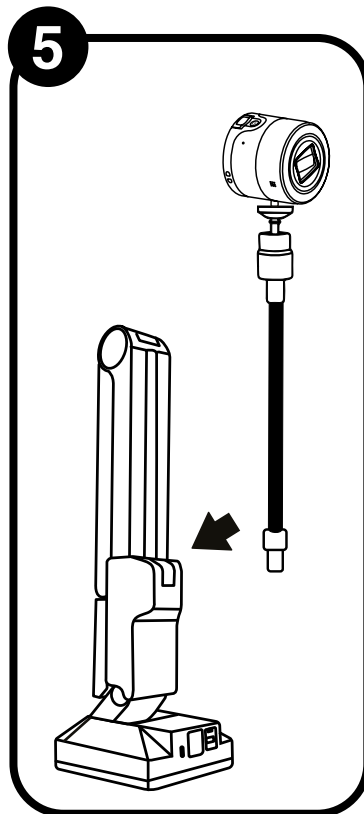

Insérez le col de cygne avec la caméra dans l'adaptateur.

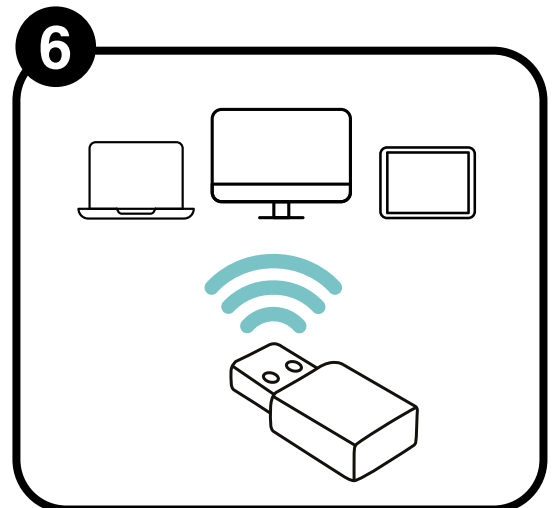


Branchez l'adaptateur **USB Wi-Fi Dual Band** dans un port USB de votre appareil Windows et suivez les courtes instructions de configuration.

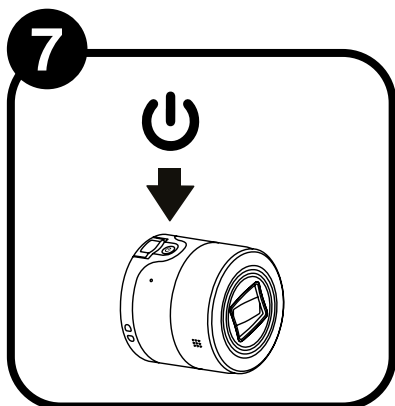


Appuyez sur le **bouton d'alimentation** de la **caméra Kodak**.




Lancez le logiciel Prodigy et ouvrez l'application **Distance**.

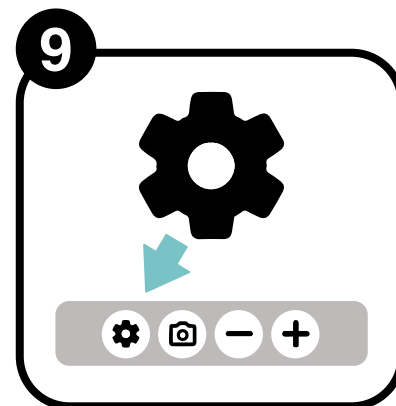


Cliquez sur l'icône **Réglages** (engrenage).

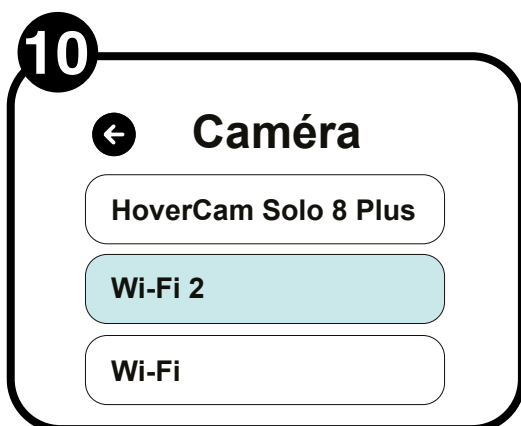

Sélectionnez « **Caméra** », puis choisissez « **Wi-Fi 2** » dans la liste du bas.

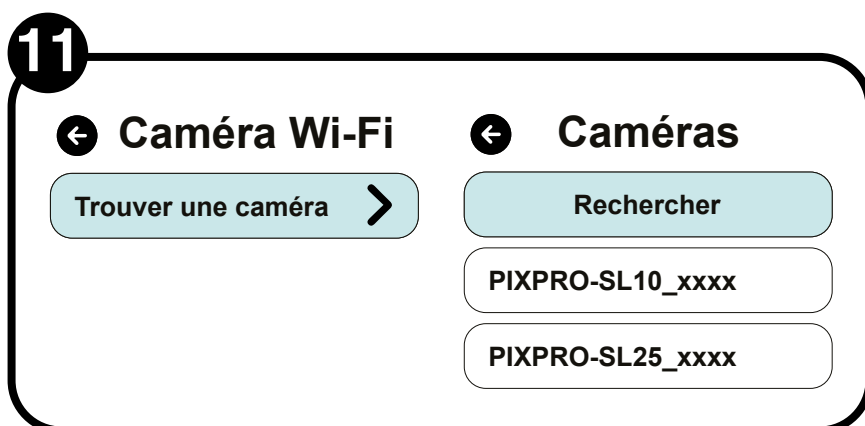

Cliquez sur « **Trouver une caméra** » et sélectionnez PIXPRO-SL10_xxxx ou PIXPRO-SL25_xxxx parmi les options.

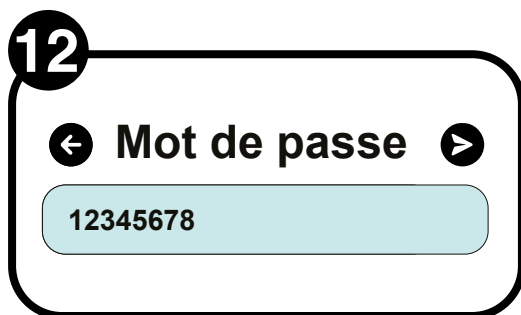

Saisissez le mot de passe de l'appareil photo Kodak : **12345678**.



Commencez à agrandir avec la caméra à distance.

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation du logiciel Prodigy Windows, ou de la caméra à distance Kodak, veuillez consulter le **Guide de l'utilisateur**.

Humañware
Membre du groupe EssilorLuxottica